

# **SPEZIAL ÖLSPRAY**

## Pflegespray für Instrumente

✓ FCKW-frei

- auf der Basis toxikologisch unbedenklicher, medizinischer Weißöle
- zur Instrumentenpflege vor der Dampfsterilisation
- optimale Schmierung beweglicher Teile



CE

### PRÄPARATETYP

**SPEZIAL ÖLSPRAY** ist ein Pflegespray für medizinische Instrumente, insbesondere für Gelenkinstrumente sowie Stahlwaren aller Art wie z.B. Turbinen, Scharniere und Hand- und Winkelstücke. Bei starren Endoskopen zur Pflege der Gelenke sowie von nicht wartungsfreien Hähnen. Das spezielle Sprühventil sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Schutzfilm, der eine Sterilisation medizinischer Instrumente nicht beeinträchtigt.

Medizinisches Instrumentarium kann anschließend der Dampfsterilisation zugeführt werden.

Die Dampfdurchlässigkeit von **SPEZIAL ÖLSPRAY** erlaubt eine sichere und effektive Sterilisation im Dampfsterilisateur.

**SPEZIAL ÖLSPRAY** erhöht die Werterhaltung der Materialien durch eine optimale Schmierung beweglicher Teile und einen wirksamen Korrosionsschutz. Aufgrund der Verwendung reiner medizinischer Weißöle ist **SPEZIAL ÖLSPRAY** äußerst materialverträglich und toxikologisch unbedenklich nach Arznei- und Lebensmittelrecht.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Pflege von Stahlwaren aller Art:

- medizinische Instrumente (z.B. vor der Dampfsterilisation)
- Luft- oder kugelgelagerte Turbinen
- Scharniere, Hand- und Winkelstücke
- Gelenke und nicht wartungsfreie Hähne von starren Endoskopen

Optimale Schmierung beweglicher Teile. Durch gleichmäßige Filmbildung auf den Stahloberflächen wird ein wirksamer Korrosionsschutz gewährleistet.

### ANWENDUNG

**Instrumente:**

Gelenke/Scharniere im halb geöffneten Zustand aus ca. 25 cm Entfernung einsprühen. Anschließend ggf. sterilisieren.

**Achtung:** Nicht zu viel Öl aufsprühen, um die Sterilisation nicht zu behindern. Es darf nur ein dünner Ölfilm verbleiben.  
**Turbinen, Scharniere oder Hand- und Winkelstücke:**  
 Zweimal täglich, bzw. vor jedem Autoklavieren/ Sterilisieren ca. 1 Sek. durchsprühen. Beim Sprühen Dose senkrecht halten. Vor Gebrauch schütteln.  
 Geeignet zur Dampfsterilisation und zur Heißluftsterilisation bis zu max. 180 °C.

### ZUSAMMENSETZUNG

Medizinisches Weißöl nach DAB 10  
 Treibgas Propan/ Butan (FCKW-frei)

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Spraydose	12 x 500 ml	-	00-108-005

### BESONDERE HINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Hochentzündlich. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

**SPEZIAL ÖLSPRAY** kann bei Latex- und Gummiteilen Quellung verursachen; in solchen Fällen **SILIKONSPRAY** verwenden.

Nicht als Gleitmittel für flexible Endoskope verwenden.

### PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

